

Snabbguide för Flocare[®] Infinity[™] Pump

Januari 2018



Lätt att rengöra under rinnande vatten!



- Flocare Infinity-pumpen är enbart avsedd för enteralt bruk.
- Använd endast Flocare Infinitys medföljande tillbehör.
- Innan sondmatning påbörjas, följ de lokala rutinerna för kontroll och skötsel av sonder och matningskatetrar.
- Patienter som ges sondnäring ska regelbundet hållas under uppsikt.
- Uppladdat batteri håller i ca 24 timmar. Använd endast Nutricias batteriladdare.
- Pumpen ska kontrolleras av auktoriserad tekniker om tekniskt fel inträffar eller om pumpen tappas eller skadas på annat sätt.
- Servicekontroll av pumpen genomförs vartannat år.

Koppla **Flocare Infinity** pumpaggregat till sondnäring i Pack



Fastsättning av Flocare Infinity-aggregat

1. Kontrollera att bäst-föredatum inte har överskridits.
2. Skruva av korken på sondnäringförpackningen. Låt skyddsfolien sitta kvar.
3. Punktera folien med spetsen på aggregatet.
4. Skruva fast aggregatet.



Upphängning av Pack


5. Häng upp Packen på droppställningen.

Insättning av Flocare Infinity pumpaggregat



Öppna pumpluckan

1. Tryck in låset och vrid locket uppåt.

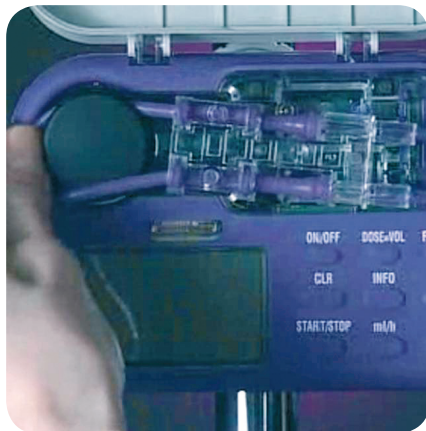

Fastsättning av Flocare Infinity aggregat

2. Fäst den ögelformade silikonslangan på pumpaggregatet runt rotorn.

Dra försiktigt och tryck ner pumpaggregatet.


Stäng pumpluckan.



Flocare Infinity aggregat är utrustade med ett automatiskt friflödesskydd.

Starta pumpen

1. Tryck in 2 sek.
2. Tryck med ett lätt tryck på clear-knappen (CLR-knappen).
Given mängd nollställs.

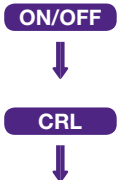

3. Lossa på skyddshylsan längst ned på aggregatet.
4. Tryck in 2 sek.
Aggregatet fylls med sondnäring.
5. Koppla sedan till sond, knapp eller PEG.



↓

Välj program
Kontinuerlig matning
eller
Doserad matning
se nästa sida.

Att välja program

PROGRAM - KONTINUERLIG MATNING

Tryck.

ml/h



Tryck på
+/- knapparna
för val av flödes hastighet.
(Doseringsval 1–400 ml/h).



Tryck.

START/STOP

Inställningen är klar.

PROGRAM - DOS/BESTÄMD MÄNGD

Tryck.

ml/h



Tryck på
+/- knapparna
för val av flödes hastighet.
(Doseringsval 1–400 ml/h).



Tryck.

DOS/VOL

CONT= kontinuerlig matning
kommer att visas i displayen.



Tryck in önskad
mängd med
+/- knapparna.
(Volymval 1–4000 ml).



Tryck.

START/STOP

Inställningen är klar.

Att stänga av pumpen

1. Tryck.

START/STOP




2. Tryck in 2 sek.

ON/OFF

Pumpen stängs av.



Att felsöka

Indikationer	Orsak	Åtgärd
NO SET	• Aggregatet saknas eller är felaktigt monterat.	START/STOP → Sätt i aggregatet. Starta pumpen.
	• Trycksensorn är smutsig.	Rengör sensoreerna. Sätt i aggregatet. Starta pumpen.
END OF DOSE	• Pumpen har levererat programmerad dos.	START/STOP → INFO → CLR → START/STOP Tryck 2 sek
AIR	• Luft i pumpaggregatet.	FILL SET → Ta ut aggregatet. Tryck sedan Fill Set.
	• Tomt pumpaggregat.	START/STOP → Sondnäringen är slut. Byt ut den tomma sondnäringsförpackningen.
	• Luftsensorn är smutsig.	Rengör sensoreerna.
OCC IN	• Pumpen har känt av ett uppströms stopp mellan pumpen och sondnäringsförpackningen.	START/STOP → Ta ut aggregatet. Kontrollera om det är stopp mellan aggregatet och sondnäringen. Sätt i aggregatet. Starta pumpen.
	• Trycksensorn är smutsig.	Rengör sensoreerna. Sätt i aggregatet. Starta pumpen.
OCC OUT	• Pumpen har känt av ett nedströms stopp mellan pumpen och patienten.	START/STOP → Ta ut aggregatet. Kontrollera om det är stopp i aggregatet. Byt ut aggregatet. Starta pumpen.
	• Medicinkranen är stängd.	Öppna kranen.
	• Trycksensorn är smutsig.	Rengör sensoreerna. Sätt i aggregatet. Starta pumpen.
Upprepad OCC OUT	• Kalibreringen är inte slutförd för det isatta aggregatet.	START/STOP → Larmet stängs av. START/STOP → Pumpen startar. Låt den gå en kort stund. START/STOP → Pumpen stängs av. Kontrollera att det inte har inträffat "occlusion-out-larm". Ta bort aggregatet från pumpen, sätt tillbaka det igen. Tryck START/STOP åter igen.
PROG	• Pumpen inväntar inställning/programmering.	Välj - kontinuerlig matning eller max dos/volym.
DOOR	• Luckan ej ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är stängd.
BATT	• Batterikapaciteten för låg.	Ladda batteri.
Blinkande batterisymbol E  F	• Batterifel.	Kontakta Nutricia.

Inställningar

Observera! Dessa grundinställningar får endast göras av utbildad sjukvårdspersonal eller annan person med behörighet. Inställningar för att;

- Ställa in larmets ljudnivå
- Låsa knapparna
- Stänga av larmet
- Ställa in permanent belysning i displayen (OBS endast vid koppling till elnätet)

Börja med att kontrollera att Flocare Infinity-pumpen är avstängd. Följ instruktionerna.

Starta pumpen

ON/OFF → +

Håll ned samtidigt i 2 sek

Inställning av larmets ljudnivå, högt/lågt (Beep high/Beep low)

ON/OFF → + → + Beep high
- Beep low → ON/OFF

Håll ned samtidigt i 2 sek

2 sek

Låsning av knapparna, låst/icke låst (Lock/Unlock)

ON/OFF → + → FILL SET → + Lock
- Unlock (UNLK) → ON/OFF

Håll ned samtidigt i 2 sek

2 sek

Inställning till tyst läge (mute) när den programmerade dosen är levererad

ON/OFF → + → FILL SET → FILL SET → + Beep high
- Beep low → ON/OFF

Håll ned samtidigt i 2 sek

2 sek

Inställning av bakgrundsbelysning (light)

ON/OFF → + → FILL SET → FILL SET → FILL SET → + Light on (LITE ON) → ON/OFF

Håll ned samtidigt i 2 sek

- Light off (LITE OFF) 2 sek



Nutricia Nordica AB, Box 3142, 169 03 SOLNA

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 08-24 18 80

E-post: info.amse@nutricia.com •

www.nutricia.se