

# FLOCARE INFINITY GO BAG

## Ryggsäck för mobilt bruk av sondnäring

**Flocare Infinity Go Bag** och stativ passar till Flocare Infinity nutritionspumpar samt Nutricias sondnäringsflaska och Flocare Container, men även övriga sondnäringar på marknaden kan användas i ryggsäcken. Vi rekommenderar användning av Flocare Infinity Mobile pumpaggregat vid mobil användning. Ryggsäcken är stabil och lätt att bära, den är enkel att rengöra och går att maskintvätta i 40 grader. Stativ ingår. Ryggsäcken kan användas för både barn och vuxna.



# Flocare Infinity Go Bag

## Beskrivning

- Praktiska reglerbara bärremmar i nylon.
- Höjd: 33 cm.
- Framsida i lättavtorkad nylon. Utrustad med två ytterfack.
- Baksida ergonomiskt utformad som ger bra komfort.
- Reglerbart bröstbälte och midjebälte.
- Nylonband med knäpplås för fastsättning av sondmat.
- Särskilt fack i stativet för fastsättning av Flocare Infinity pump.
- Lättåtkomlig öppning i sidan för pumpaggregat.
- Passar alla typer av sondnäringsförpackningar.

## Bruksanvisning

1. Placera pump och sondnäring på medföljande stativ. Stängs med rem och knäpplås. Stativet är flexibelt och hyllan kan flyttas beroende på användningsområde.
2. Placera stativet med pump och sondnäring i väskan.
3. Dra upp dragkedjan till locket på framsidan om du vill justera pumpen eller titta på skärmen.
- 4A. Placera aggregatet i fickan på axelbandet.
- 4B. Öppna dragkedjan på framsidan och för ned aggregatet i ryggsäcken.
- 4C. För ut aggregatet genom öppningen på sidan och koppla till sond eller gastrostomateter/knapp.
- 4D. Öppna lilla locket på framsidan för att starta pumpen.
5. Vid tvätt – öppna dragkedjan i ryggsäcken och ta ut stoppningen innan du tvättar ryggsäcken.
6. Ryggsäcken kan hängas upp med axelbandet på rullstol, barnvagn eller sängkarm.

## Skötselråd

Flocare Infinity Go Bag är gjord av nylon. Vid eventuellt spill, torka av med fuktig trasa – använd varmt vatten. Använd inte kemikalier!


Går att maskintvätta i 40 grader.



## Beställning

Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [nutricia.se/order](http://nutricia.se/order), e-post: [order.amnse@danone.com](mailto:order.amnse@danone.com) eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Antal/förp.
Flocare Infinity III stativ	90 05 37	1 st
Flocare Infinity Go bag	75 19 00	1 st
Flocare Infinity II stativ	75 19 01	1 st

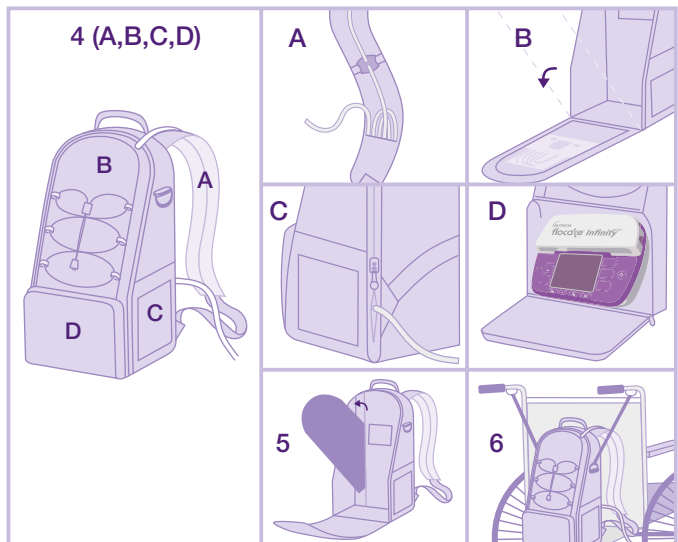

## Viktigt!

När pumpen är igång ska Flocare Infinity Go Bag hållas upprätt. Sondnäringsförpackningen hänger då upp och ner, vilket ger ett jämnt sondnäringsflöde.