


# ENFit™ Flergångsspruta (DASH 3® Plus)

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

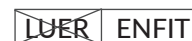

ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus) är osterila efter första användningen och de får inte användas på fler än en patient.



1. Rengör sprutan direkt efter användning. Undvik att låta mat eller medicinrester blir kvar och torka in i sprutan då det förkortar sprutans livslängd.




2. Dra ut hela kolven från hylsan. Det är inte nödvändigt att ta av den svarta gummipackningen från kolven.

3. Tvätta båda delarna (kolv och hylsa) grundligt för hand med varmt vatten och diskmedel (Yes handdiskmedel eller liknande) för att få bort alla eventuella mat eller medicinrester.

4. Skrubba/skrapa **inte** någon del av sprutan, eftersom detta kommer förkorta dess livslängd.

5. Skölj kolv och hylsa noggrant under kallt rinnande kranvatten eller i en skål med rent vatten i.

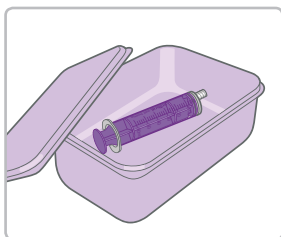

6. Skaka ur överskottsvatten och låt därefter samtliga delar lufttorka.

7. Torka **inte** delarna med papper, handduk eller liknande, eftersom detta kommer förkorta livslängden på sprutan.

8. Montera ihop kolv och hylsa när de torkat och förvara sprutan på en ren och torr plats. Undvik att förvara sprutan i direkt solljus.

9. Sprutorna kan användas upp till 7 dagar i följd.



### De ska kastas när antingen:

- Graderingen blir otydlig eller börjar försvinna.
- Kolven blir trög att använda.
- Sprutan har använts i 7 dagar.

Kontakta sjukvårdspersonal innan användning av ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus).

ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus) distribueras av Nutricia.