


FLOCARE SONDER ENFit

**Röntgentät nasogastrisk
sond med ENFit-koppling
och förilagd ledare.**

Flocare matningssonder är tillverkade i polyuretan och är därför mjuka och smidiga. De är röntgentäta samt har en förilagd följsam ledare för säker och smidig användning. Sonderna finns i flera storlekar.

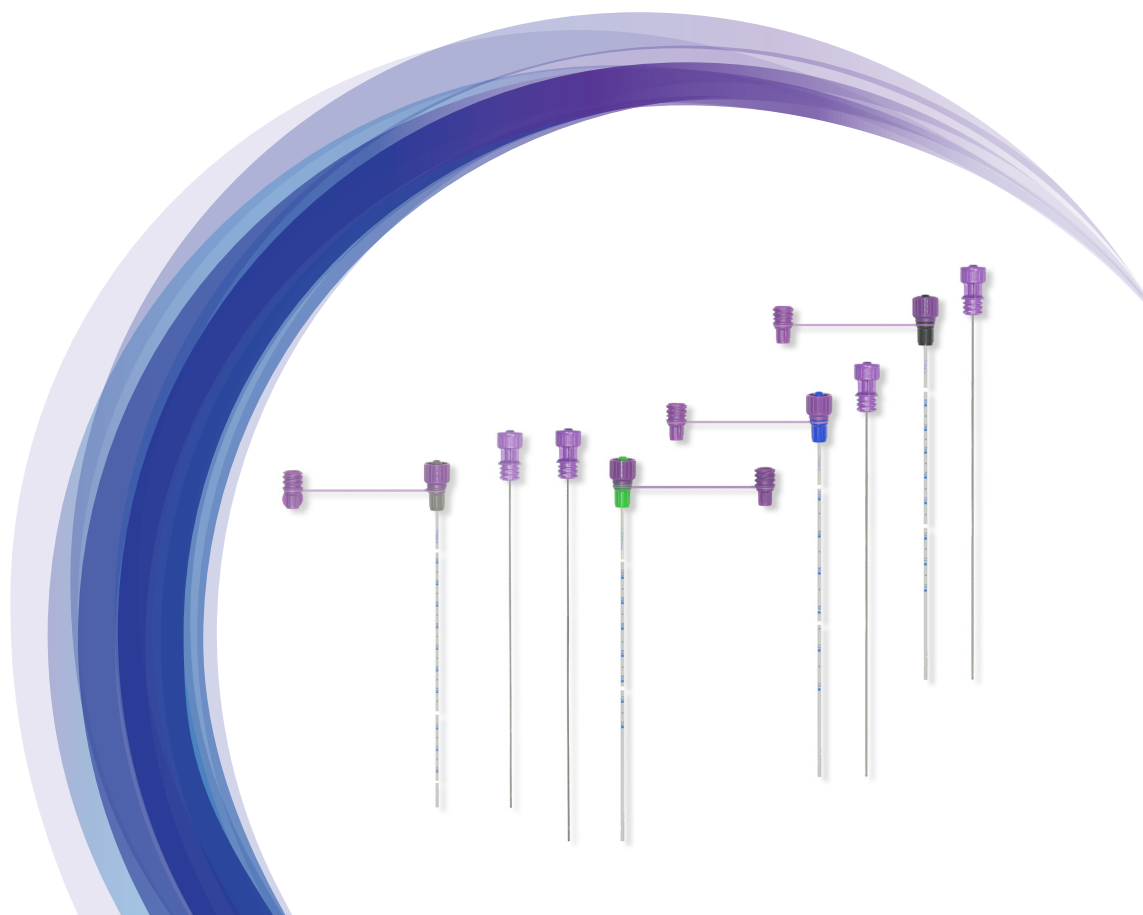

Flocare Sonder ENFit

- Förlagd smord ledare.
- ENFit-koppling.
- Längd 110 cm, Ch 6, 8 och 10.
- Barnsond 50 cm, Ch 5.
- Röntgentät linje.
- Mjuk rundad spets med 2 laterala hål.
- Avståndsmarkeringar var 20:e cm från distala änden.
- Sondens läge kan kontrolleras genom luftinblåsning med ledaren i
- Flocare Sonder ENFit är tillverkad i polyuretan, som är ett mjukt och smidigt material.

	Innerdiameter	Ytterdiameter	Färg på koppling
Ch 5	0,89	1,67	Grå
Ch 6	1,05	1,95	Grön
Ch 8	1,75	2,65	Blå
Ch10	2,05	3,30	Svart

INSTRUKTION

Förberedelser

1. Informera patienten om vad som kommer att hända.
2. Se till att patientens näsborrar är rengjorda och undersök genomträngligheten. Om patienten någon gång brutit sitt näsben kan det ha bildats brosk som försvårar införandet av sonden.
3. Mät ut behövd sondlängd;
 - håll sondspetsen mot örsnibben
 - för sonden mot nästippen
 - för sonden utmed patienten ned till nedersta biten av processus xiphoideus
 - markera på sonden utmätt längd

Obs! Om sonden skall placeras i duodenum bör ca 20 cm läggas till.

Placering av sonden

1. Fukta eventuellt sondspetsen med rekommenderat glidmedel.
2. Be patienten att luta huvudet bakåt.
3. För in sonden sakta och försiktigt via näsan, längs nedre kanten av näsborren.
4. När sonden nått strupen, ta en paus och be patienten luta huvudet framåt och sätta hakan mot bröstet.
5. Fortsätt införandet av sonden. Be patienten att svälja när han känner sonden i halsen och för ner sonden tills tidigare gjord markering är nådd. Införandet kan, om inga kontraindikationer föreligger, underlättas genom att patienten samtidigt dricker lite vatten.
6. Om patienten börjar hosta eller får kväljningar skall sonden omedelbart dras tillbaka.
7. Fäst sonden temporärt med tejp vid patientens näsa.
8. Kontrollera sondens läge genom antingen;
 - auskultation – stöt in 5-10 ml luft i ventrikeln. Auskultera över epigastriet
 - aspiration – aspirera och kontrollera med lackmuspapper
 - röntgen – vid osäkerhet, genomlys eller röntgenkontrollera.
9. Dra ur sondens ledare och fäst sonden permanent.

Skötsel av sonden

- Spola alltid sonden före och efter matning samt vid uppehåll i matningen.
- Inspektera näsan dagligen.
- Spritavtvätta kopplingen dagligen.
- Kontrollera alltid sondens läge före måltid.

Rekommenderad maximal ligg tid är 6 veckor (42 dygn).

Beställning

Flocare Sonder ENFit kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: nutricia.se/order, e-post: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Förpackning
Flocare sond ENFit Ch 5, 50 cm	75 88 39	10 st
Flocare sond ENFit Ch 6, 110 cm	75 88 47	10 st
Flocare sond ENFit Ch 8, 110 cm	20 00 18	10 st
Flocare sond ENFit Ch 10, 110 cm	20 00 19	10 st