

## Övergångsadaptrar för Nutricias sondmatningstillbehör i samband med ENFit

Alla Flocare ENFit-övergångsaggregat från Nutricia har vita adaptrar, till skillnad från tidigare ENLock-aggregat där var allt lila. De kan därför lätt särskiljas från varandra. Flocare ENFit-övergångsaggregat fungerar till alla kopplingar där ENLock-aggregaten tidigare använts. Undantaget är att det nu inte längre finns någon luer-fattning bakom ENLock-adaptern. Där finns istället en ENFit-fattning.


Övergångsadaptrarna nedan är avsedda att användas som ett extra tillbehör till de undantagsfall där kompatibilitet inte fungerar med de adaptrar som finns förpackade med övergångsaggregaten.

### Övergångsadapter till sond/matningsslang med ENLock- eller konfattning

Artikelnummer: 90 05 47

REF/CORP-kod: 58 97 32

Förpackad tillsammans med övergångsaggregat: JA

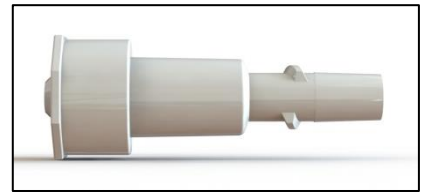

Denna övergångsadapter är avsedd att koppla aggregat eller enterala sprutor med ENFit-koppling till sonder/matningsslangar/katetrar med ENLock-honkoppling eller konfattning. Adaptern är av samma typ som tidigare satt skruvad på ENLock-aggregaten. Adaptern sitter fastskruvad på övergångsaggregatet och kan skruvas av.

### Övergångsadapter till ENLock-, oral-, eller luerspruta

Artikelnummer: 90 05 50

REF/CORP-kod: 58 97 38

Förpackad tillsammans med övergångsaggregat: JA




Denna övergångsadapter är avsedd att koppla ENLock-, oral- eller luersprutor till sonder/matningsslangar/medicinportar med ENFit-fattning. Sitter fastskruvad på övergångsaggregatet och kan skruvas av.

### Stegadapter till sond/matningsslang med konfattning

Artikelnummer: 90 05 51

REF/CORP-kod: 58 98 28

Förpackad tillsammans med övergångsaggregat: NEJ

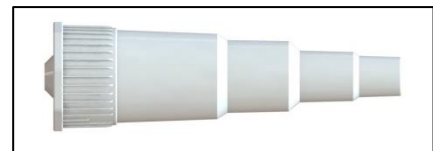


Denna övergångsadapter är avsedd att koppla aggregat eller enterala sprutor med ENFit-koppling till sonder/katetrar med konfattning, i de undantagsfall där ENLock-adaptern (som sitter på övergångsaggregatet) inte passar bra nog i infarten. Ersätter tidigare 5-stegsadapter.

## Övergångsadapter till luer-hankoppling

**Artikelnummer:** 90 05 48

**REF/CORP-kod:** 58 97 33

**Förpackad tillsammans med övergångsaggregat:** NEJ

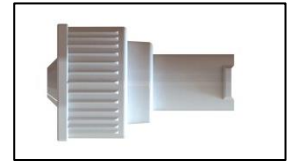

Denna övergångsadapter är avsedd att koppla aggregat eller enterala sprutor med ENFit-koppling till Luer-hankopplingar.

## Övergångsadapter för ENLock-aggregat eller ENLock-spruta

**Artikelnummer:** 90 05 49

**REF/CORP-kod:** 58 97 34

**Förpackad tillsammans med övergångsaggregat:** NEJ



Denna övergångsadapter är avsedd att koppla aggregat eller enterala sprutor med ENLock-koppling till sonder/matningsslangar/medicinportar med ENFit-fattning.