



**BOLUS-
MATNING AV
SONDNÄRING**

BOLUSMATNING AV SONDNÄRING

SÅ HÄR UTFÖR DU BOLUSMATNING

- 1 Stäng slangklämman på sonden och öppna sondkopplingen.
- 2 Dra upp 20–40 ml spolvätska. Skruva nu ihop ENFit-sprutan med sonden.
- 3 Öppna sedan slangklämman på sonden och administrera långsamt vätskan. Avslutningsvis ska du stänga klämman igen och ta bort ENFit-sprutan.
- 4 Skaka eller vänd sondnäringsen försiktigt. På så sätt undviker du att det uppstår bubblor.
- 5 Öppna korken på flaskan och skruva ihop bolus-adaptorn med flaskan.
- 6 Dra därefter upp sondnäringsen med ENFit-sprutan.
- 7 Skruva sedan ihop ENFit-sprutan med sondkopplingen.
- 8 Öppna klämman och administrera näringsen långsamt genom att trycka lätt på ENFit-sprutans kolv.
- 9 Stäng sedan klämman och ta bort ENFit-sprutan. Upprepa processen tills önskad näringsmängd har uppnåtts.
- 10 Spola slutligen med 20–40 ml vätska.

