

NUTRICIA

flocare[®] Infinity[∞] III

SNABBGUIDE

JANUARI 2021



Lätt att rengöra under rinnande vatten



- Flocare Infinity-pumpen är enbart avsedd för enteralt bruk.
- Använd endast Flocare Infinitys medföljande tillbehör.
- Innan sondmatning påbörjas, följ de lokala rutinerna för kontroll och skötsel av sonder och matningskatetrar.
- Patienter som ges sondnäring ska regelbundet hållas under uppsikt.
- Uppladdat batteri håller i ca 24 timmar. Använd endast Nutricias batteriladdare.
- Pumpen ska kontrolleras av auktoriserad tekniker om tekniskt fel inträffar eller om pumpen tappas eller skadas på annat sätt.
- Servicekontroll av pumpen genomförs vartannat år.

Koppla Flocare Infinity pumpaggregat till sondnäring i flaska



Fastsättning av Flocare Infinity pumpaggregat

- 1 Kontrollera att bäst-före-datum på sondnäringen inte har överskridits.
- 2 Öppna "flip-top" korken.
- 3 Tryck ner spetsen på aggregatet i flaskan och skruva fast.

Upphängning av flaskan

- 4 Häng upp flaskan i ögla på droppställningen.

Systemet är stängt och därmed förebyggs kontamination vid hantering.

Insättning av Flocare Infinity pumpaggregat




Öppna pumpluckan

- 1 Tryck in låset och vrid locket uppåt.



Fastsättning av Flocare Infinity aggregat

- 2 Fäst den ögelformade silikonslingan på pumpaggregatet runt rotorn.
Dra försiktigt och tryck ner pumpaggregatet.
Stäng pumpluckan.

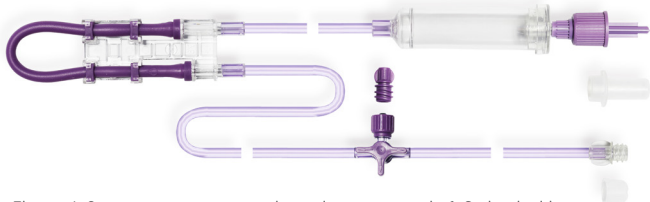


Flocare Infinity aggregat är utrustade med ett automatiskt frifödesskydd.

Grundinställningar

VÄLJ SPRÅK

Välj språk genom att trycka på  och gå till SPRÅK och välj önskat språk.

STÄLL IN TID OCH DATUM

Ställ in tid och datum genom att trycka på  och gå till DATUM OCH TID och ställ in dessa på lokal tidszon.

Pumpen växlar inte automatiskt till visning av sommartid eller av andra tidszoner vid resa.

LJUD

Flocare Infinity III stöder 3 olika LJUDVOLYMER som kan ställas in av användaren, "Låg, Medel och Hög". Av säkerhetsskäl ökas larmvolymen automatiskt till Hög i både inställningen "Låg" och "Medel" efter 3 min. Den här säkerhetsfunktionen kan inte avaktiveras.

DISPLAY

LJUSSTYRKA kan ställas in till en lämplig nivå beroende på ljusförhållandena i omgivningen. Displayens ljusstyrka kan ställas in på läget AUTO DIMMING när enheten är ansluten till nätström. När AUTO DIMMING är aktiverat dämpas displayens ljusstyrka efter 2 minuter.

Att stänga av pumpen

Tryck på  2 sekunder.

Starta pumpen



- A. Hem
- B. Tysta larm
- C. Information
- D. Start/paus
- E. Fyll aggregatet
- F. Inställningar
- G. Program
- H. Funktionsknappar
- I. På/Av


- 1 Tryck in **I** 2 sekunder tills ett pip hörs. Pumpen gör nu ett kort självtest.
- 2 Lossa på skyddshylsan längst ned på aggregatet.
- 3 Tryck in **E** 2 sek. Aggregatet fylls med sondnärning.
- 4 Koppla sedan till sond, knapp eller PEG.

↓
Välj mellan tre olika program
se nästa sida

Att välja program VOLYM-HASTIGHET

- Tryck på knappen **PROGRAM** på startskärmen.
- Välj **VOLYM - HASTIGHET** genom att trycka på motsvarande funktionsknapp.
- Tryck på funktionsknappen **VOLYM**.
- Ändra volymen med knapparna **+** och **-** tryck sedan på knappen **>** för att bekräfta värdet.
- Tryck på funktionsknappen **HASTIGHET**.
- Ändra flödes hastigheten med knapparna **+** och **-** tryck sedan på knappen **>** för att bekräfta värdet.
- Tryck på **START/PAUS**-knappen för att påbörja programmet **VOLYM - HASTIGHET**.


Inställningen är klar.

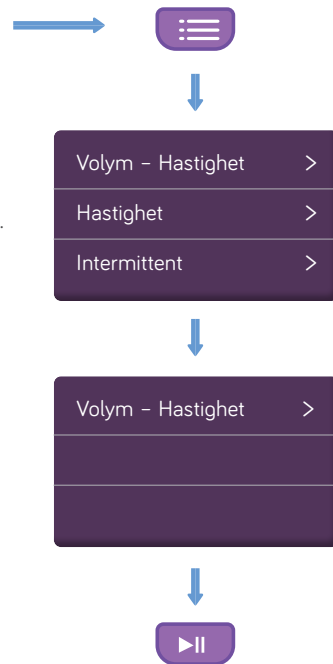

Att välja program HASTIGHET

- Tryck på knappen **PROGRAM** på startskärmen.
- Tryck på funktionsknappen **HASTIGHET**.
- Ändra flödes hastigheten med knapparna **+** och **-** tryck sedan på knappen **>** för att bekräfta värdet.
- Tryck på **START / PAUS**-knappen för att påbörja programmet **HASTIGHET**.

Inställningen är klar.

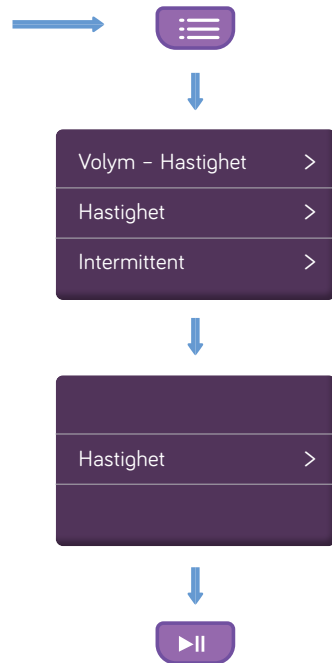

Att välja program INTERMITTENT

Programmet **INTERMITTENT** har en stegvis inställning, där alla parametrar måste anges och bekräftas innan du kommer tillbaka till startskärmen.

- Tryck på knappen **PROGRAM** på startskärmen.
- Välj **INTERMITTENT** genom att trycka på motsvarande funktionsknapp.
- Tryck på funktionsknappen **TOTAL VOLYM**.
- Ändra volymen med knapparna **+** och **-** tryck sedan på knappen **>** för att bekräfta värdet.
- Tryck på funktionsknappen **PORTIONER**.
- Ändra önskad portioner med knapparna **+** och **-** tryck sedan på knappen **>** för att bekräfta värdet.
- Tryck på funktionsknappen **PAUS**.
- Ändra önskad paustid med knapparna **+** och **-** tryck sedan på knappen **>** för att bekräfta värdet.
- Bläddra uppåt och nedåt med funktionsknapparna **1** och **3** genom alla programmerade inställningar och bekräfta värdena.
- Bläddra till **BEKRÄFTA** och bekräfta genom att trycka på funktionsknapp 2.
- Tryck på funktionsknappen **PAUS**.
- Tryck på **START / PAUS**-knappen för att påbörja programmet **INTERMITTENT**.



OBS! När pumpen är i läget **NÄSTA PORTION** visas tiden på startskärmen, vilken räknas ned till nästa portion.

Körindikatorn visas under hela nedräkningen.

Att felsöka

Om du vet hur larmet skall lösas tryck på  för att stoppa larmet och lösa problemet.

Om du inte inte vet hur larmet skall lösas. Tryck på  för att stoppa ljudet i 2 minuter.

Tryck därefter på  för att få information om orsaken till problemet och hur det kan lösas.

Tryck på  för att stoppa larmet och lösa problemet.

LARMBESKRIVNING	ORSAK	LÖSNING
Agg. > 24 tim.	Påminnelse om att aggregatet har använts längre än 24 timmar och måste bytas ut.	Byt ut Flocare Infinity-aggregatet mot ett nytt.
Batteriet slut	Batteriet är nästan urladdat.	Anslut pumpen till nätadaptern och nätuttaget direkt och ladda upp batteriet under 6 timmar. Pumpen kan användas under batteriladdning.
Blockering – inkommande	Pumpen känner av en blockering mellan pumpen och sondnäringsförpackningen. Smuts i sensorområdet. Återkommande larm.	Kontrollera om det är stopp eller förekommer andra blockeringar i aggregatet mellan pumpen och sondnäringsförpackningen. Rengör sensorområdet. Byt ut Flocare Infinity-aggregatet om larmet kvarstår.
Blockering – utgående	Pumpen känner av en blockering mellan pumpen och patienten. Smuts i sensorområdet. Återkommande larm.	Kontrollera om det är stopp eller förekommer andra blockeringar i aggregatet mellan pumpen och sonden. Rengör sensorområdet. Byt ut Flocare Infinity-aggregatet om larmet kvarstår.
Byt ut aggregatet	Aggregatet har använts i över 24 timmar.	Byt ut Flocare Infinity-aggregatet mot ett nytt.
Hastighet inte angiven	Ingen flödes hastighet har programmerats när matningen startats.	Ange ett värde för Hastighet (mL/t).
Ingen kontaktsymbol visas när pumpen är ansluten till nätström	Nätuttaget fungerar inte. Nätadaptern är skadad.	Anslut pumpen till ett annat nätuttag. Kontakta pumpleverantören för byte.

LARMBESKRIVNING	ORSAK	LÖSNING
Laddar var god vänta	Batteriet laddas upp.	Vänta tills batteriet är helt uppladdat.
Luckan är öppen	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan.
Luft i aggregatet	Pumpen har detekterat luft i aggregatet. Smuts i luftsensorområdet.	Tom sondnäringsförpackning: Koppla loss och kassera förpackningen samt aggregatet eller byt ut. Om sondnäringsförpackningen INTE är tom: Koppla loss sondmatningsslangen och använd funktionen Fyll AGG för att få bort eventuell luft i systemet. Koppla tillbaka sondmatningsslangen och återuppta sondmatningen. Se till att det inte finns skum i sondmatningsförpackningen. Se till att luftsensorn är ren.
Låg batterinivå	Batteriets laddningsnivå är låg.	Anslut pumpen till nätadaptern och nätuttaget och ladda upp batteriet under 6 timmar. Pumpen kan användas under batteriladdning.
Program klart	Pumpen har slutfört den programmerade matningen.	Tryck på START-knappen [] om programmet är slutfört.
Programslut	Programmet har uppnått inställd målvoly.	Tryck på START-knappen [] för att bekräfta varningsmeddelandet. Stäng av pumpen om programmet är slutfört.
Se till pumpen	Ingen åtgärd har utförts på pumpen under 3 minuter.	Tryck på valfri knapp för att bekräfta varningsmeddelandet.
Senaste matning ofullständig	Pumpen stängdes av innan matningen hade slutförts.	Tryck på START/PAUS-knappen [] för att starta om programmet. Tryck på ÅTERUPPTA för att fortsätta matningen.
Service rekommenderad	Serviceintervallet för förebyggande underhåll har överskridits.	Skicka pumpen till leverantören för service.
Systemfel	Ett internt systemfel har inträffat i pumpen.	Stäng AV pumpen, kontrollera att luckan är stängd och slå på pumpen igen. Kontakta leverantören för att byta ut pumpen om felet kvarstår.
Sätt in aggregatet igen	Aggregatet är inte ordentligt anslutet.	Anslut ett Flocare Infinity-aggregat.
Tangentbordet är låst	Tangentbordet är låst för att förhindra att en knapp trycks ned oavsiktligt	Lås upp tangentbordet genom att trycka på iknappen [] och FUNKTIONSKNAPP 3 samtidigt.
Volymer inte angiven	Ingen volym har programmerats när matningen startas.	Ange ett värde för Volymer (mL).

Nutricia Nordica AB
Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Tel: 08-24 15 30 • Fax: 08-24 18 80
E-post: info.amnse@nutricia.com
www.nutricia.se



NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION